

06.10.2020

**Betreff: Allgemeine Information zur Entnahme von Abstrichen der oberen Atemwege**

Sehr geehrte Damen und Herren,

Basis für die Verwendung der NADAL® Schnelltests ist eine korrekte und gründliche Probenentnahme. Im folgenden einige Hinweise des Robert-Koch-Instituts (RKI)\* zur Entnahme von Abstrichen der oberen Atemwege (Abb. 1). Bitte beachten Sie außerdem die Hinweise in der Packungsbeilage des jeweiligen NADAL® Tests.


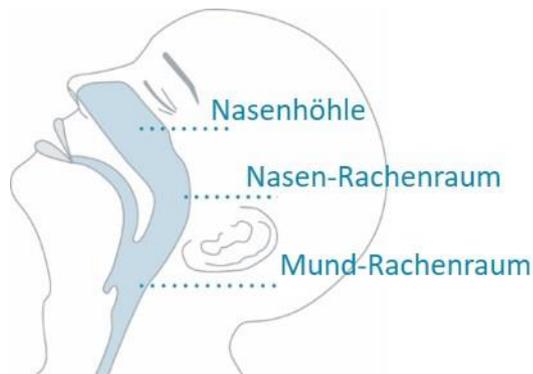


Abbildung 1 Obere Atemwege

### Nasenabstrich (nasal)

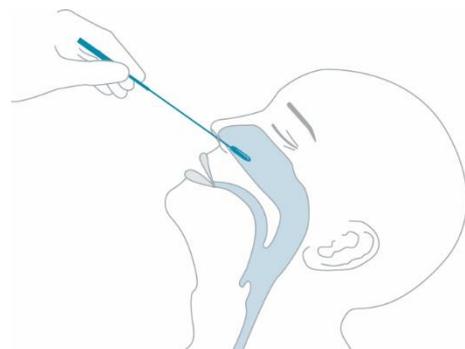

Für die Entnahme eines Nasenabstriches empfiehlt das RKI\* den Abstrichtupfer parallel zum Gaumen bis zur Nasenmuschel in die Nase einzuführen. Nach einigen Sekunden kann der Tupfer mit rotierender Bewegung wieder entfernt werden und für die weitere Analyse verwendet werden.

#### nal von minden GmbH

Carl-Zeiss-Straße 12  
47445 Moers  
Deutschland

Friedenstraße 32  
93053 Regensburg  
Deutschland

Tel.: +49 941 29010-0  
Fax: +49 941 29010-50

info@nal-vonminden.com  
www.nal-vonminden.com

Geschäftsführer:  
Sandra von Minden  
Roland Meißner  
Thomas Zander

Registergericht  
HRB  
Steuer-Nr. 244/133/00130  
UST-ID-Nr. DE 189 016 086

Kleve: 5679  
Sparkasse  
Regensburg  
Kto: 840 017 073  
BLZ: 750 500 00

Deutsche Bank  
Kto: 056 998 800  
BLZ: 350 700 24


Schnelltests

Labordiagnostika

Laborservice


Beratung &amp; Service

### Nasen-Rachenabstrich (nasopharyngeal)

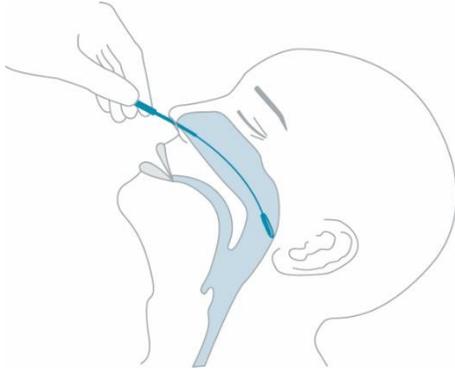

Für die Entnahme eines Nasen-Rachenabstrichs empfiehlt das RKI\* zuerst die Nase schneuzen zu lassen. Der Kopf sollte leicht in den Nacken gelegt und mit der nicht dominanten Hand abgestützt werden. Der Abstrichtupfer wird fast horizontal entlang der Nasenscheidewand in die Nase bis zur Rachenwand eingeführt. Nach einigen Sekunden wird er mit rotierender Bewegung wieder entnommen.

### Mund-Rachenabstrich (oropharyngeal)

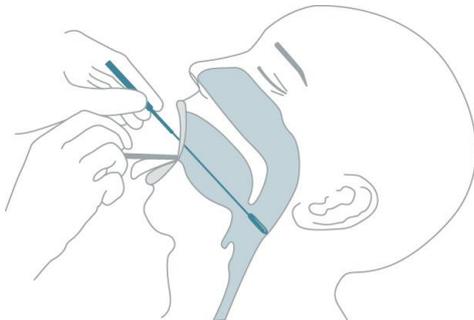

Für die Durchführung eines Mund-Rachenabstrichs empfiehlt das RKI\* zunächst die Zunge mit einem Spatel herunterzudrücken. Der Tupfer wird dann mit drehender Bewegung kräftig an der Rachenwand entlang gestrichen, wobei weder Zungengrund noch der weiche Gaumen berührt werden dürfen.

\* [www.rki.de/DE/Content/Infekt/NRZ/Influenza/hinweise/Abstrich.html](http://www.rki.de/DE/Content/Infekt/NRZ/Influenza/hinweise/Abstrich.html)

Mit freundlichen Grüßen

Ihr nal von minden Support-Team

#### nal von minden GmbH

Carl-Zeiss-Straße 12  
47445 Moers  
Deutschland

Friedenstraße 32  
93053 Regensburg  
Deutschland

Tel.: +49 941 29010-0  
Fax: +49 941 29010-50

info@nal-vonminden.com  
www.nal-vonminden.com

Geschäftsführer:  
Sandra von Minden  
Roland Meißner  
Thomas Zander

Registergericht  
HRB  
Steuer-Nr. 244/133/00130  
UST-ID-Nr. DE 189 016 086

Kleve: 5679  
Sparkasse  
Regensburg  
Kto: 840 017 073  
BLZ: 750 500 00

Deutsche Bank  
Kto: 056 998 800  
BLZ: 350 700 24

Schnelltests

Labordiagnostika

Laborservice

Beratung & Service